



## LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA IMPRONTA PER MOUTHGUARD

Le impronte necessarie sono due, superiore ed inferiore, i modelli saranno posizionati su un articolatore per rilevare la corretta masticazione del MOUTHGUARD con l'antagonista, in maniera da permettere la protezione da colpi laterali anche delle cuspidi dei denti diatorici inferiori.

Il protocollo prevede che l'impronta superiore sia presa con materiali siliconici, polivinilsilossani, o polieteri.

E' fondamentale che l'impronta superiore rilevi fino alla piega mucolabiale, è importante che siano visibili tutti i frenuli per poter scaricare il MOUTHGUARD in quelle zone e ciò permetterà di proteggere tutte le parti del mascellare fin dove possibile.

L'impronta inferiore può essere rilevata in alginato, serve per una corretta occlusione.

In caso di malocclusioni è utile una masticazione rilevata in cera.

E' possibile produrre MOUTHGUARD anche in presenza di "splintaggi" o "ortodonzie".



Impronta corretta



Impronta non adeguata

Vi auguriamo di essere i prossimi a provare un MOUTHGUARD BAD WOLF.  
Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattarci.

